

取扱説明書

散薬混和器 ふりませ君

P B - 0 0 1




問い合わせ先

大同化工株式会社

本社 〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号
TEL 06-6901-1855 FAX 06-6901-1910

ホームページ <http://www.daido-kako.com/>
e-mail info@daido-kako.com

1. 各部の名称

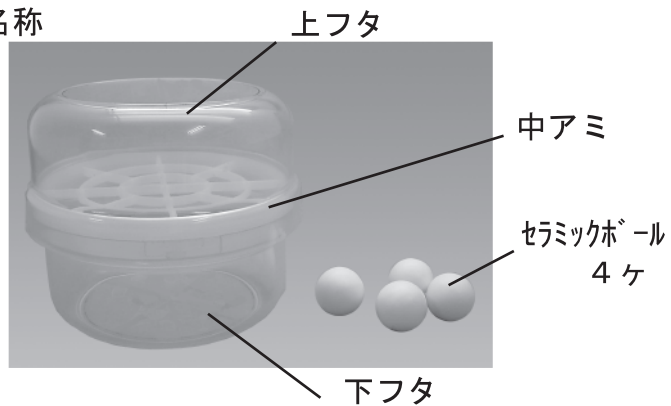

容器を持ち振る。



上下逆さまにする。


2. 使い方



上フタを外す。



中アミを外す。

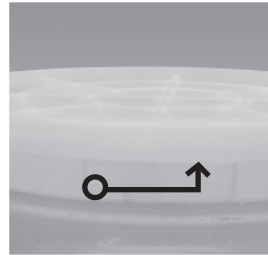


右に回して上へ外す。
(拡大図)




下フタを開ける。



薬を取り出す。

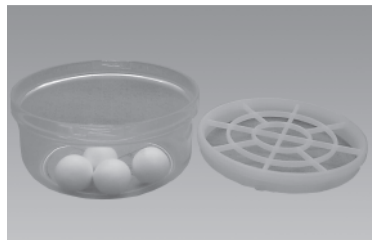


セラミックボールを入れる。

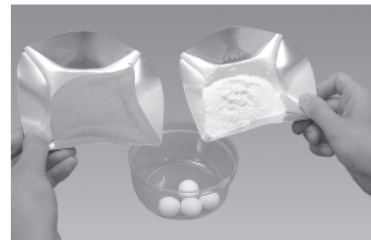

混和する散薬を入れる。



中アミを付ける。

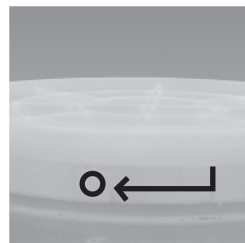

下に入れて左に
回してロックする。
(拡大図)



上フタを付ける。

3. 注意点

- ・ 散薬を混和する目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・ 水洗いは出来ますが、アルコール・ベンジン等、有機溶剤等のご使用はしないで下さい。破損の恐れがあります。
- ・ 商品を落したり、硬い所へはぶつけないで下さい。破損の恐れがあります。
- ・ 熱は、避けて下さい。商品が変形する恐れがあります。
- ・ 付属のセラミックボール以外は使用しないで下さい。
- ・ 薬剤を混和・粉碎の際は必ず医師・薬剤師にご相談下さい。

4. 仕様

商品名	ふりませ君
品番	PB-001
材質	上フタ・下フタ:ポリカーボネイト 中アミ:ポリプロピレン セラミックボール:セラミック
外寸	φ:107mm H:89mm
重量	168g
耐熱	60度以下