




取扱説明書

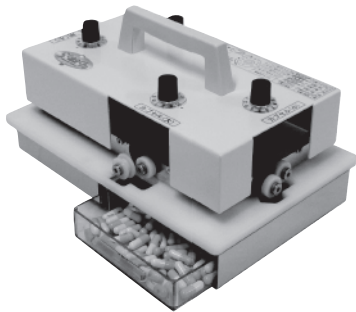


らく錠くんタイプ4R
HT-2003



らく錠くんタイプ2
HT-3003

《各部の名称》

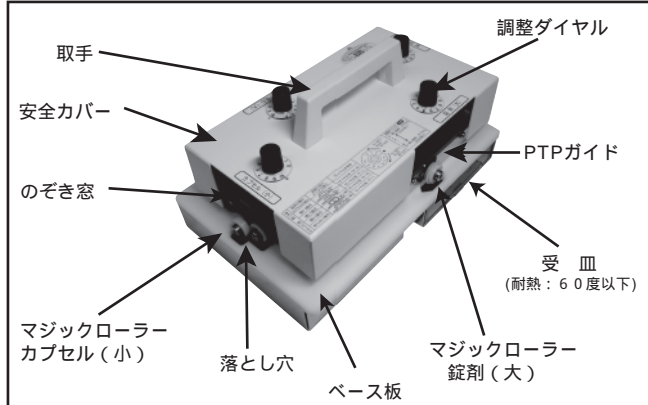

DAIDO 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号
TEL (06)6901-1855(代表) FAX (06)6901-1910

お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社
調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com/>

《らく錠くん仕様》

機種	タイプ4R	タイプ2	
型番	HT-2003	HT-3003	
対応範囲	錠剤・カプセル共用	錠剤専用	
外寸	本体	W262×D183×H152(mm)	W205×D144×H146(mm)
	受皿	2本 W120×D120×H27(mm)	1本 W140×D140×H30(mm)
重量	3kg	1.8kg	
材質	ステンレス アルミ ABS スチール アクリル PVC	ステンレス アルミ PP スチール アクリル PVC	
機能方式	手動式	手動式	
定価	58,000円(税抜)	38,000円(税抜)	

《注意事項》

- らく錠くんを使用する際には、左手で取手を押さえ右手でPTPシートを持ってご使用下さい。
- PTPシートは、本説明書の使用方法のとおりにお持ち下さい。それ以外の持ち方は思わぬケガや錠剤がでない原因となります。
- 錠剤・カプセルの種類によっては、上手く取り出せない場合や破損する場合がございます。本製品はすべての錠剤・カプセルに対応できる訳ではございませんのでご了承ください。特に表面がやわらかい薬剤はマジックローラーの圧力を吸収して、下のアルミ箔が破れない場合があります。錠剤・カプセルが破損しますので、ご使用の際には特にご注意ください。
- 違う種類の薬剤を除包する際は、必ず受皿を取り出して前回の残りがいないかをご確認下さい。また、PTPシートのアルミ箔がはがれ、薬剤に混入する場合がございますので、除包された薬剤は必ず確認し、アルミ箔が混入した場合は取り除いてください。

< 関連商品 >

患者様にも

《ハンディ除包器》

独自の特許機構により、柔らかい錠剤・カプセルなど除包する際にお薬の破損を軽減しております。



製品名 トリダス TOP-001-G
定価 1,280円(税抜)

患者様用の自助具として!



置いて トリダス


薬局様の業務用として!




持って トリダス

《錠剤配分用ケース》

分包機など錠剤やカプセルを投入する際にケースや瓶に容易に移し換える便利品

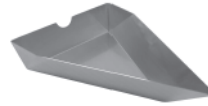

製品名 ステルスケース HS-001
定価 2,500円(税抜)

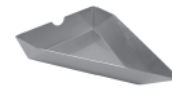

製品名 ステルスケースミニ HS-002
定価 1,980円(税抜)

《錠剤計数配分器》


- ・目視で錠剤が数えやすい
- ・監査がしやすい

錠剤を素早く数える



製品名 数えマス KYC-100
定価 3,800円(税抜)

※列の数を数えて計数表を参照し数えます。

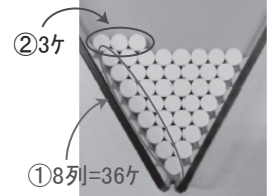

①+②=39ヶ