


《投薬例》



お薬週かん 1シート
(200mm×280mm)ポリチャック袋に入れて湿気対策も可能です。

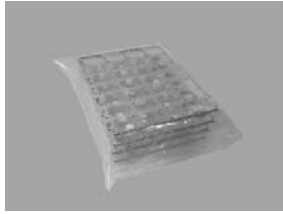

お薬週かん 4シート
(240mm×340mm)ポリチャック袋に入れて湿気対策も可能です。



お薬週かん 1シート
レジ袋やA4薬袋にも入ります。


《間違っ分包装された場合》

本製品は「使い切り」仕様になっており、シート・ラベルの再利用が不能でございます。恐れ入りますが、各部品のスペアパーツをご用意しておりますので、お買い求め下さい。


品名	品番	定価(税抜)	送料
お薬週かん スペアシート(10枚入)	OWP-28M-S	980円	
お薬週かん スペアトレイ(10個入)	OWP-28M-T	800円	350円
お薬週かん スペアラベル(10枚入)	OWP-28M-R	400円	

《お薬の開封・取り出し方》

投薬後は、必ず別紙の「患者様用取扱説明書」を同封されて下さい。

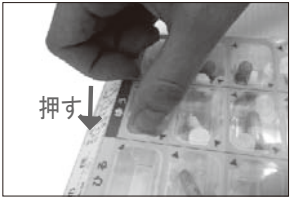

- ①お薬服用前に、用法・容量と服用日を確認して下さい。
- ②シート上のミシン目を指で押して開封します。

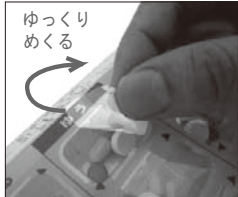

- ③シートフィルムを指で開けて切り取り、お薬を手に取ります。
- ⚠ やぶり取ったシートフィルムの誤飲にご注意下さい。



⚠ 注意

- お薬の保管は、高温、多湿、直射日光などは避けて下さい。
- シートの接着には期限があります。ご購入後1年以上のものはご使用にならないで下さい。
- お薬を開封の際に、ミシン目によってフィルムをゆっくりとご開封下さい。お薬がとびだす原因にもなります。
- 本製品の誤ったご使用によって生じた直接、間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

《仕様》

品名	お薬週かん
品番	OWP-28M-50(50セット入)、OWP-28M-100(100セット入)
仕様	1セット 1週間1日4回・28マシ ｼｰﾙ式簡易密封式/散薬は対応不可
寸法	1セット 縦222×横164×厚み20(mm)
材質	ﾄｲｰPET・ｼｰﾄｰPET・ﾌﾞﾙｰ紙(再剥離ﾗｰﾍﾞﾙ)＊日本製
入数	●1箱 50セット入 (ﾄｲ50個、ｼｰﾄ50枚、ﾌﾞﾙ50枚) ●1箱 100セット入 (ﾄｲ100個、ｼｰﾄ100枚、ﾌﾞﾙ100枚)
定価	●50セット/箱 7,500円(税抜) ●お徳用100セット/箱 13,800円(税抜)
備考	●1小間の入り数の目安/直径7mm錠剤で約40錠、 0号ｶｯﾌﾟﾙで5ヶ、1号ｶｯﾌﾟﾙで7ヶ、2号ｶｯﾌﾟﾙで10ヶ ●1ヶ月分の4セット重ねﾀｲﾌﾟ 縦222×横164×厚み76(mm)

本製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一不具合ございましたらお買上の販売店または弊社お客様窓口までご連絡下さい。

《お問合せ先は》

DAIDO DAIDO KAKO CO.,LTD
大同化工株式会社

本社 〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号

TEL (06) 6901-1855(代表) FAX (06) 6901-1910

e-mail info@daido-kako.com URL http://www.daido-kako.com


本取扱説明書は予告なく変更することがございます。

ご使用前に必ずお読み下さい



週間お薬管理シート お薬週かん

取扱説明書

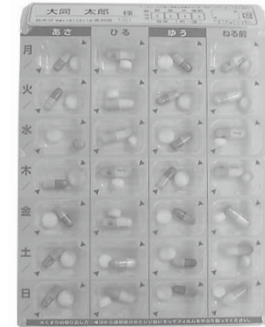


◆ はじめに ◆

この度は弊社製品をご用命いただき誠に有難うございます。本書では、本製品を正しくご使用いただくための重要事項を記載しております。本製品をご使用前に、よくお読みになり、正しく安全にご使用くださいますようお願いいたします。またご使用中にいつも参照できますよう大切に保管下さい。


⚠ 注意 【本製品をご使用前に】

- 必ず用法と用量をご確認後、ご使用して下さい。
- お薬が直接触れる箇所は衛生面にご注意下さい。
- 本製品は滅菌処理はしておりません。滅菌が必要な場合はアルコールなどで消毒して下さい。
- トレイ部分は柔らかい材質です、取扱いはご注意ください。高温などは避けて下さい。
- 簡易密封式ですので散薬は分包できません。湿気に弱い薬品をご使用する場合は、ポリチャック袋に入れて下さい。
- お薬の保管は、高温、多湿、直射日光などは避けて下さい。

《1箱分のセット内容》

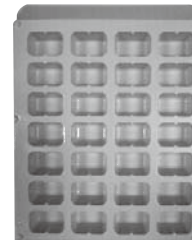

①トレイ

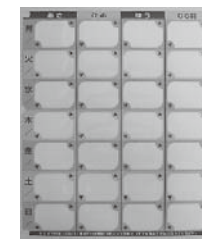

②シート



③お薬配分補助シート



⑤ラベル



④本取扱説明書



⑥患者様用取扱説明書

《入数》

	OWP-28M-50(50セット入)	OWP-28M-100(100セット入)
①	50個	100個
②	50枚	100枚
③	1枚	1枚
④	1部	1部
⑤	50枚	100枚
⑥	50部	100部


《ご使用方法》



①重なっているトレイを裏側にし、下側の中央部分からつまみ取って下さい。



上記は取りにくい例です。

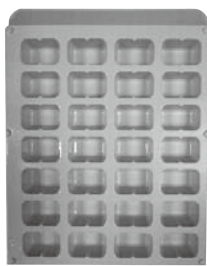

②トレイをご用意下さい。
※アルコールふき取りも可能です。



③お薬配分補助シートをご用意下さい。




④お薬配分補助シートの上にトレイを置き、お薬を投入して下さい。




⑤お薬をご確認して下さい。

⚠️ 簡易密封式ですので散薬は分包できません。湿気に弱い薬品をご使用する場合は、ポリチャック袋に入れて下さい。


⚠️ お薬を詰めすぎますと、監査時に確認しにくいです。マスの80%位に収まるように入れて下さい。

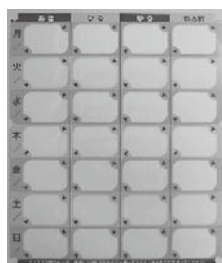

⑥シートをご用意下さい。

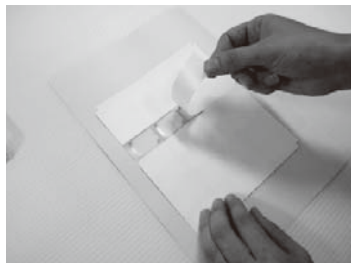



⑦シート裏側のセパレート紙が3つに分かれています。中央のみをはがして下さい。

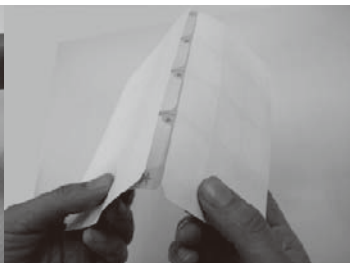

シートを裏から曲げるとはがしやすくなります。




⑧トレイにシートを貼り付けます。トレイの「▶」凸部と、シートの切込み「▶」部分を合わせて貼り合わせます。

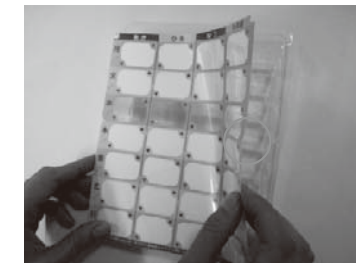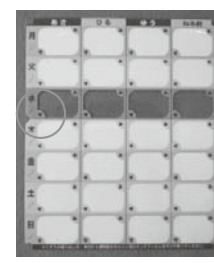

片側もトレイの「◀」凸部と、シートの切込み「◀」部分を合わせて貼り合わせます。



⑨貼りずれをご確認下さい。トレイの「▶」凸部にシートがかぶるとシートからお薬が漏れることがあります。

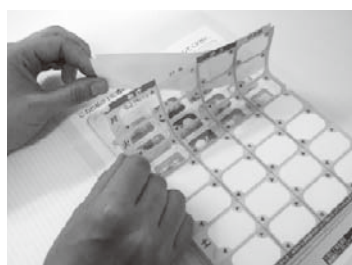

⑩シート裏側のセパレート紙上側をはがしてトレイに貼って下さい。



拡大



拡大



⑫シート裏側のセパレート紙下側をはがしてトレイに貼って下さい。



⑬両面から監査しやすくなります。曜日の下に日付の記入もできます。



⑭シートの上から手で押さえて下さい。トレイとシートが接着しないとお薬が漏れることがあります。




未記入



ご記入例

⑮ラベルに患者様の用法・容量などご記入することができます。

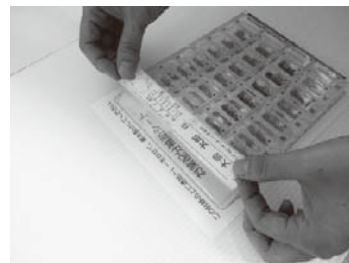

⑯ラベルをトレイ上部に貼ることができます。

⚠️ 簡易密封式ですので散薬は分包できません。湿気に弱い薬品をご使用する場合は、ポリチャック袋に入れて下さい。



完成品です。
B5サイズほどの大きさとレジ袋やA4薬袋にも入ります。