


錠剤計数配分器

数えマス

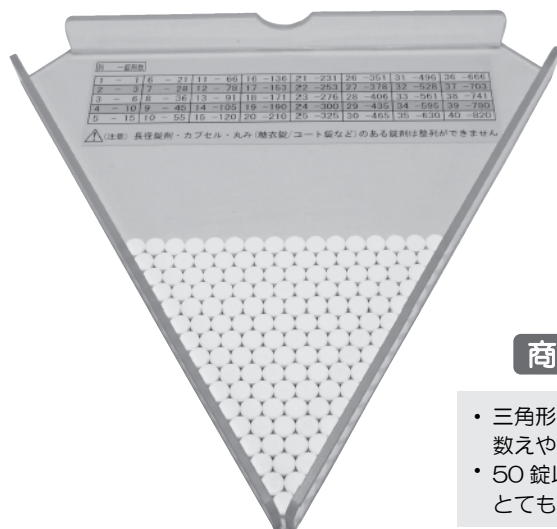

商品の特徴


- ・ 三角形の片側を利用して数えやすい
- ・ 50 錠以上数えるのにはとてもスピーディー！

列	一錠剤数								
1	- 1	6	- 21	11	- 66	16	-136	21	-231
2	- 3	7	- 28	12	- 78	17	-153	22	-253
3	- 6	8	- 36	13	- 91	18	-171	23	-276
4	- 10	9	- 45	14	-105	19	-190	24	-300
5	- 15	10	- 55	15	-120	20	-210	25	-325

⚠(注意) 長径錠剤・カプセル・丸み(糖衣錠/コート錠など)のある錠剤は整列ができません

使用方法

- ・ 三角形の両端には、薬の出口が左右についてます。
残りの角に錠剤を並べて行きます。
- ・ 正三角形の形を応用してるので錠剤がきれいに整列します。
- ・ 列の数を数えて計数表を参照し数えます。
- ・ 目視で監査し、監査が終わったら両端のお薬の出口から、錠剤を出します。

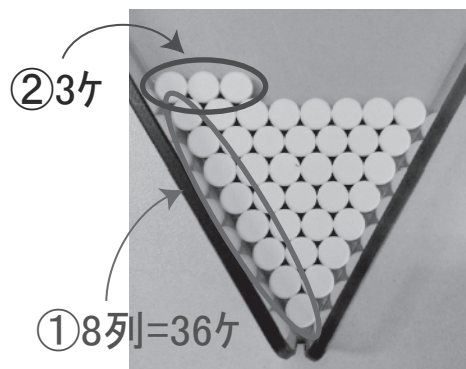

① + ② = 39ヶ

注意事項



【断面図】



薬の表面を膜でおおたもの



注意！

- ・ 長径錠剤・カプセル・丸み(糖衣錠 / コート錠など)のある錠剤は、整列ができません。
- ・ 錠剤を数える目的以外に、使用しないで下さい。
- ・ 錠剤をのせたまま長時間保管、保存しないで下さい。
- ・ 研磨剤入りの洗剤、金ブラシなどによるの水洗いは避けて下さい。
- ・ 乾燥機など高温乾燥は避けてください。
- ・ 汚れが付着した時は、アルコールで拭いてください。

仕様

製品名	数えマス
型番	KYC-100
サイズ	W:216×D:200× 厚み:20 (mm)
材質	ポリ塩化ビニル (PVC)

製造元・お問い合わせ



大同化工株式会社

大阪本社

〒570-0002

大阪府守口市佐太中町4-19-15

TEL 06-6901-1855

調剤便利グッズ ホームページ <https://www.daido-kako.com>