




取扱説明書



らく錠くんタイプ2
HT-3003

《各部の名称》

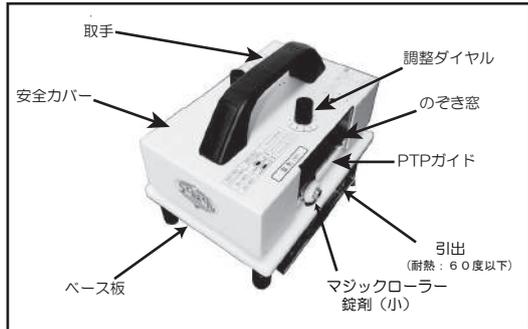

daido 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号
TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910

お問い合わせ e-mail info@daido=kako.com

大同化工株式会社
調剤便利グッズホームページ <http://www.daido=kako.com/>

<関連商品>

患者様にも

《ハンディ除包器》

独自の特許機構により、柔らかい錠剤・カプセルなど除包する際に、お薬の破損を軽減しております。



製品名 トリダス TOP-001-G
定価 1,280円(税抜)

患者様用の自動具として!



置いて トリダス


薬局様の業務用として!



持って トリダス

《錠剤配分用ケース》

分包機など錠剤やカプセルを投入する際にケースや瓶に容易に移し換える便利品

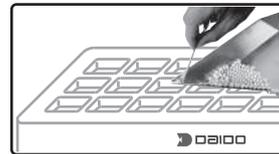

製品名 ステルスケースミニ HS-002
定価 1,980円(税抜)

《錠剤計数配分器》


- ・目視で錠剤が数えやすい
- ・監査がしやすい

錠剤を素早く数える



製品名 数えマス KYC-100
定価 3,800円(税抜)

※列の数を数えて
計数表を参照し
数えます。

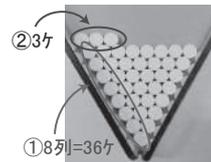

《らく錠くん仕様》

| | | |
|------|---|---------------------|
| 機種 | タイプ2 | |
| 型番 | HT-3003 | |
| 対応範囲 | 錠剤専用 | |
| 外寸 | 本体 | W205×D144×H146 (mm) |
| | 引出 | W140×D140×H30 (mm) |
| 重量 | 1.8kg | |
| 材質 | ステンレス アルミ PP スチール アクリル PVC | |
| 機能方式 | 手動式 | |
| 定価 | 38,000円(税抜) | |
| | 引出 HT-C2 | |

《注意事項》

- 1、らく錠くんを使用する際には、左手で取手を押さえ右手でPTPシートを持ってご使用下さい。
- 2、PTPシートは、本説明書の使用方法のとおりにお持ち下さい。それ以外の持ち方は思わぬケガや錠剤がでない原因となります。
- 3、錠剤の種類によっては、上手く取り出せない場合や破損する場合がございます。本製品はすべての錠剤に対応できる訳ではございませんのでご了承ください。特に表面がやわらかい薬剤はマジックローラーの圧力を吸収して、下のアルミ箔が破れない場合があります。錠剤が破損しますので、ご使用の際には特にご注意ください。
- 4、違う種類の薬剤を除包する際は、必ず引出を取り出して前回の残りが無いかをご確認下さい。また、PTPシートのアルミ箔ががれ、薬剤に混入する場合がございますので、除包された薬剤は必ず確認し、アルミ箔が混入した場合は取り除いてください。

《使用方法》

① 落とし穴を決める


錠剤の大きさに、2つある落とし穴から下記を目安にPTP除包する穴をきめます。

錠剤（大） …丸型のもので直径約10mm～14mm
錠剤（小） …丸型のもので直径約9mmまでのもの

※PTPシートの形状によって、上記と異なる場合がございます。

② 調整ダイヤルを合わせる **重要**

調整ダイヤルで、錠剤の厚みに合わせてマジックローラーの高さをかえ、PTPを押し出す力の強さを調整します。

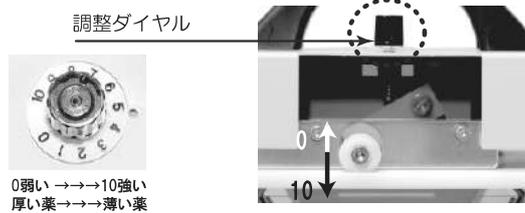

0弱い → → → 10強い
厚い薬 → → → 薄い薬

- 調整ダイヤルを0に合わせます。マジックローラーが開放状態になります。
- PTP包装の錠剤をセットします。
- セットした錠剤の厚みに合うようにダイヤルの数値を上げていき調整します。0→1→2・・・

| 種類 | 錠剤の厚み | 錠剤の高さ PTPの厚さ | ダイヤル参考値 |
|----|-------|-----------------|------------|
| 錠剤 | 厚い場合 | 高い | ダイヤル弱（3～4） |
| | 薄い場合 | 低い | ダイヤル強（7～） |

【ご注意】上記の表は本体にも貼り付けております。

③ PTPシートの握り方

※PTPシートはつまむのではなく、親指全体でしっかり握ってください。



④ 持ち方

- PTPシートを引く方法（通常/右利き）
- PTPシートを押す方法（左利き）



らく錠くんは左手で取手を押さえ、右手でPTPシートを持って引く方法でご使用下さい。

らく錠くんは右手で取手を押さえ、左手でPTPシートを持って押す方法でご使用下さい。

- 1と2の違いについて：1手早く除包できます。
- 2はPTPシートを真っ直ぐ押せます。


⑤ PTPシートの引き方

PTPガイドに錠剤の端を押し当てます。



普通に引くと右側に曲がりやすいので、錠剤をPTPガイドに押しつけるように意識しながら手前にすばやく平行に引いてください。

⑤ PTPシートの引き方

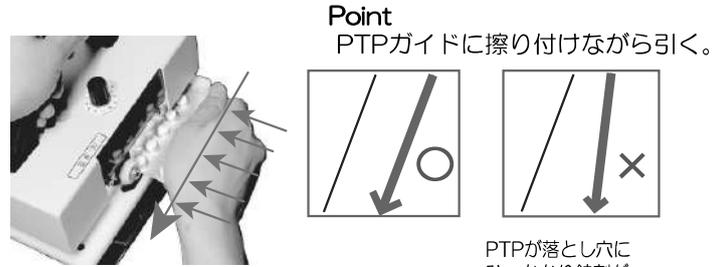


PTPが落とし穴に引っかかり錠剤が破損することがあります。

【ご注意】除包する際の速さは、薬の形状にもよりますが、目安としては錠剤1列あたり2秒程度です。

⑥ 引出のご使用方法


備え付けの受皿は、分包機のマスや瓶に移し替えしやすく傾斜をつけております。他のケースや容器にお薬を移し替える手間を軽減できます。

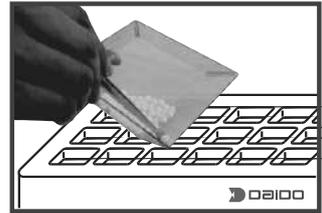


対象機種：タイプ2 HT-3003
タイプ2用引出 HT-C2

⑦ 3列のPTPシートの除包の仕方

3列シートも除包できます。
2列目を除包する時は…
1列目と2列目の間をPTPガイドの下に差し込んでください。
3列目の時は180°回転させてください。

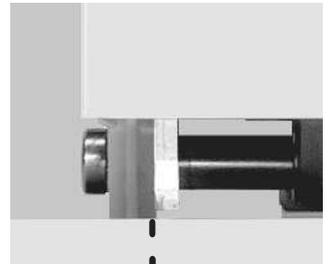

180° 回転

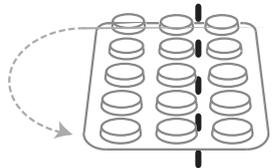

<除包できない場合は>

A. シートをこころもち下に曲げるように握ると、取り出しやすくなります。



B. 錠剤のPTPシートによっては曲がっているものもあり、PTPガイドに正確に入らない場合があります。手でまっすぐに直してから除包してください。

