

## お薬取出機「バラし錠ずトルネ」に関するよくあるご質問

No.	質問	回答
1	バラし錠ずトルネAUTO HT3-6001が急に止まりました。どうしたらいいのでしょうか？	部品の消耗をできるだけ防ぐため、連続運転は3分で自動的に停止します。電源をOFFにし、再度電源をONにすると復旧します。 本体底タイマー切り替えスイッチにて、タイマーを3分⇄6分に切替可能です。
2	PTP幅調整ハンドルの動きが悪くなった場合の対処方法は？	PTPガイドを閉じ、0の位置にしてシャフトのネジ山のところに注油してください。その他の場所への注油は厳禁です。直接スプレーなどでの注油は絶対にしないでください。各ローラーに少しでも油分が付着すると故障の原因となります。詳しくは取扱説明書のP11をご参照ください。 <a href="#">⇒バラし錠ずトルネ取扱説明書</a>
3	PTPシートに薬剤が残る場合はどうすればいいのでしょうか？	PTPガイドが広すぎることを考えられます。PTP幅調節ハンドルで少し狭めてください。
4	PTPシートをセットして動かしても引き込まない場合の対処方法は？	PTPシートの端を軽く押してください。PTPシートの種類によっては引き込みが悪かったりPTPシートが切れる場合があります。