


【重要】ご使用前の点検と日々のメンテナンス



メンテナンス方法動画



注意 バラし錠ずトルネAUTOは必ずコンセントから電源ケーブルを抜いてから作業してください。電源が入った状態で作業すると大変危険です。

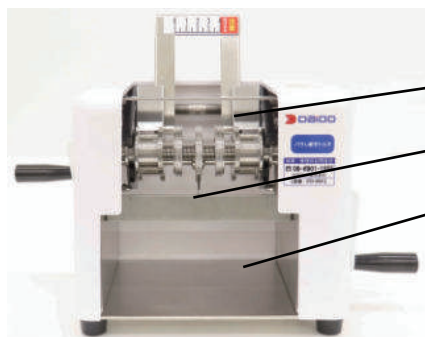

- 1、指ガードをはずします
- 2、PTP排出ガイドをはずします
- 3、受皿ケースをはずします
- 4、各種ローラー、シャフト機械内部のふき取り掃除をします



本体カバー材質 ABS

- 5、奥のローラー、シャフトのふき取り掃除は受皿ケースを取り外し手を入れてお掃除ください

【ふき取り掃除の際は、下記をご使用ください】


金属部 消毒用エタノールを含ませよく絞った布

樹脂部 水を含ませよく絞った布



本体カバー・受皿ケースなど樹脂部は水を含ませ良く絞った布でふき取ります

指カバー・受皿ケース材質 ポリカーボネート

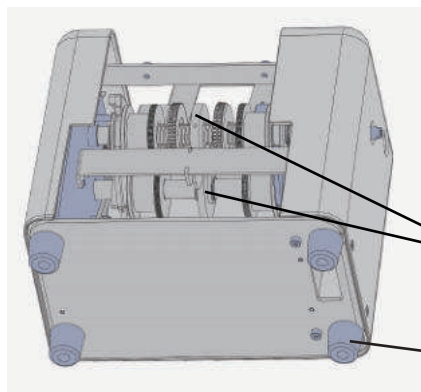


【お掃除場所】 各種ローラー・シャフト

下記の場所は常にきれいな状態でご使用ください

受皿ケースを取り外し、下から機械内部を見たところ

ゴム足4カ所は設置した場所の材質により黒く跡が付くことがあります。消毒用エタノールを含ませた布でふき取って下さい

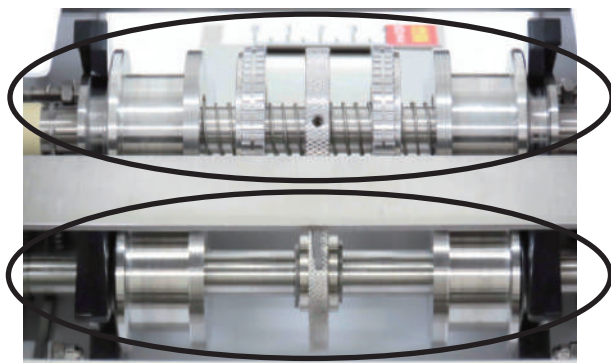

手前のローラー・シャフト

汚れている場合は掃除してください

奥のローラー・シャフト

汚れている場合は掃除してください



注意

機械内部のローラー部分やシャフトなど、薬剤が触れる場所が汚れている場合は、必ずふき取り掃除して機械の汚れを取り除いてからご使用ください。薬剤の汚れや、異物混入の原因となります。