

## ① PTP 排出ガイドを取り付ける

拡大



切れ込みに合わせながら、PTP 排出ガイドを取り付けます

## ② 転倒防止ステイをセットする




本体底の転倒防止ステイのネジを緩め、90度外側に回し  
ネジを締めこみ転倒防止ステイを固定させる。

## ③ PTPガイドの幅調整



PTP幅調整ハンドルを回しPTPガイドを調整します  
錠剤を軽く挟む状態までPTPガイドを狭めハンドルを45度戻し  
PTPシートがスムーズに投入できるようにします

## ④ PTPシートをセットする

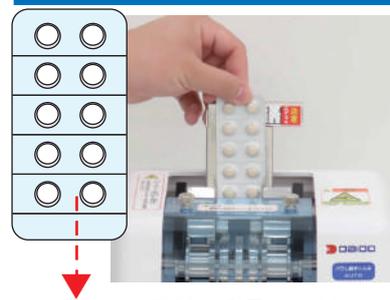

耳がある長い方が下

## ⑤ PTP送りハンドルを回す



PTP送りハンドルを回す 時計回り / 錠剤を取り出す  
機械本体の安定の為、写真のように手を添えてPTP送りハンドルを回してください。

## ⑥ 受皿ケースを引き出す



受皿ケースを引き出し錠剤を取り出します  
※異物がないか必ず確認してください


## 3列シートは、2回機械を通すことによって対応可能です

1回目



3列シートの③列目を右PTPガイドの空洞に入れセットします  
①列目②列目の錠剤を取り出します

2回目

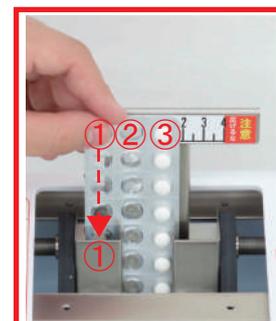

①列目を左PTPガイドの空洞に入れセットします  
③列目の錠剤を取り出します