

# スマッシャー Smasher



DTS-60

## 新機能とメンテナンス性を両立した錠剤粉碎機

NEW



### 操作性

粉碎する錠剤の量や硬さによって  
4パターンの機能が選択できる。

### 安全性

受皿カップ・ミキサー部が  
セットされていないと作動しません。  
消耗しないステンレスカップ採用。

### メンテナンス性

各部品が取り外し可能。  
リペア可能に！

### イチオシ ポイント

薬剤が接触する部分の取り外しが可能に！お掃除がしやすく衛生的！  
ミキサー部の消耗部品が交換可能になり、ランニングコスト大幅ダウン！

刃がはずせる



ウレタンマットがはずせる



ベアリング軸がはずせる



# ワン・ツー・スリーの簡単操作

カップに錠剤を入れる

ミキサー部接続

本体に乗せてスタート

①



②



③



## 4パターンの機能



5秒フラッシュ（4回）

5秒フラッシュ（6回）ボタン長押し時

5秒フラッシュ 5秒 → 休 1秒 5秒 → 休 1秒 5秒 → 休 1秒 5秒 → 自動停止



連続（20秒）

連続（30秒）ボタン長押し時

連続・停止 スタート → 自動停止

## 安全性

受皿カップを定位置に取り付けていない場合には作動しない安全設計。  
また、モーター負荷を検知した場合、電源を遮断し電子部品の故障を未然に抑制します。



過負荷ヒューズ  
モーター復旧スイッチ

## リペア可能でランニングコスト低減

今まで取り外しが難しかった中心の軸。  
取り外しが可能になり、掃除も可能で衛生的。  
またベアリングが消耗しても部品の交換で機能を再生でき、ランニングコスト低減しました。



ベアリング軸  
DTS-E5  
価格5,500円(税抜)




ミキサー部  
お手入れ方法動画

※ミキサー部は水洗いできません。

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 製品名        | スマッシャー                               |
| 型番         | DTS-60                               |
| 粉碎能力       | 5錠～150錠 ※錠剤の種類やサイズによって異なります。         |
| 回転数        | モーター単体 16,000rpm以上                   |
| 安全機構       | 受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー                |
| 刃/受皿カップ材質  | ステンレス                                |
| ミキサー部/本体材質 | アルミ+ステンレス/ABS樹脂                      |
| サイズ        | 幅・奥行168.5×高さ273(mm)                  |
| 重量         | 2.1kg                                |
| 電源/消費電力    | AC100V(50/60Hz) 待機時1w以下/最大300w       |
| 付属品        | テフロンワッシャー3枚・波ワッシャー1枚・変形レンチ1ヶ・ハケブラシ1本 |
| 価格         | 99,800円(税抜)                          |

## 消耗品・追加購入品

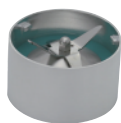

|        |         |         |        |         |                |        |          |        |             |            |
|--------|---------|---------|--------|---------|----------------|--------|----------|--------|-------------|------------|
| 製品名    | 受皿カップ   | ミキサー部   | ベアリング軸 | ウレタンマット | テフロンワッシャー(3枚入) | 替刃     | ナット(2ヶ入) | 変形レンチ  | 波ワッシャー(3枚入) | ハケブラシ(2本入) |
| 型番     | DTS-D1  | DTS-D2  | DTS-E5 | DTS-E6  | HTF-B2         | DTS-E3 | DTS-E4   | DTS-E7 | DTS-E8      | HTF-B3     |
| 価格(税抜) | 20,000円 | 40,000円 | 5,500円 | 1,500円  | 850円           | 3,000円 | 1,000円   | 1,500円 | 1,000円      | 1,850円     |

## daido 大同化工株式会社

本社／〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号  
TEL (06) 6901-1855(代表) FAX (06) 6901-1910

東京／〒144-0052 東京都大田区蒲田3丁目23番8号 蒲田ビル10階  
TEL (03) 6428-7631 FAX (03) 6428-7632

九州／〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号  
TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198

お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社 調剤便利グッズ で 検索  
調剤便利グッズ  
ホームページ <https://www.daido-kako.com/>



お問い合わせは