



# バラし錠す 取扱説明書

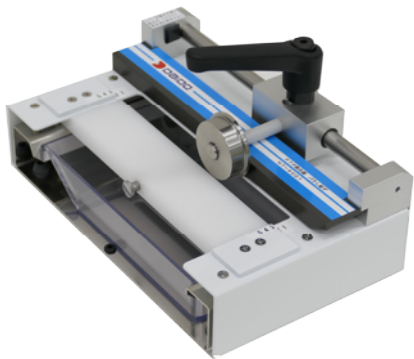

バラし錠す  
HT-4001

## 《各部の名称》

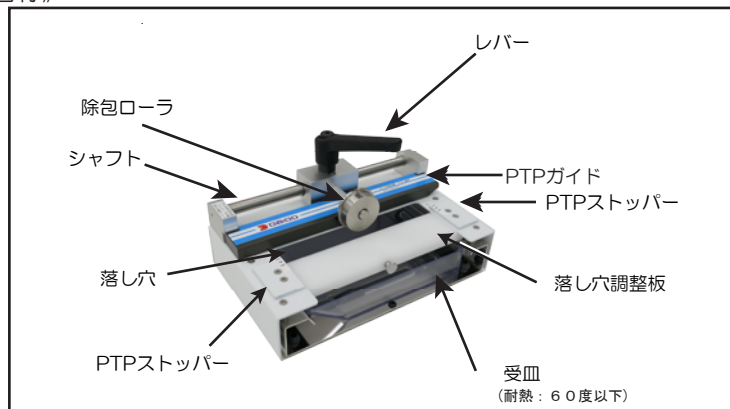

**DAIDO 大同化工株式会社**

本社／〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号  
TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910

お問い合わせe-mail [info@daido-kako.com](mailto:info@daido-kako.com)

大同化工株式会社  
調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com/>

## ＜関連商品＞

患者様にも

### 《トリダスPRO》

直接、分包機の錠剤マスにお薬を撒くことができます。



製品名 トリダスPRO T0-100


一包化の業務効率を大幅にUP



|        |                     |
|--------|---------------------|
| 対応錠剤   | 直径 5 mm ～ 10.5 mm程度 |
| 対応カプセル | 0号～ 5号              |

### 《錠剤配分用ケース》

分包機など錠剤やカプセルを投入する際にケースや瓶に容易に移し換える便利品

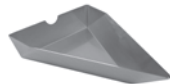


製品名 ステルスペースミニ HS-002



### 《錠剤計数配分器》


- ・目視で錠剤が数えやすい
- ・監査がしやすい

錠剤を素早く数える

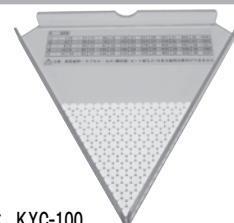

製品名 数えマス KYC-100

※列の数を数えて  
計数表を参照し  
数えます。

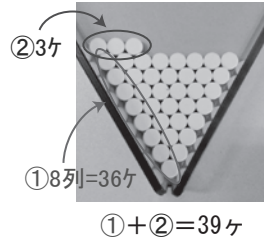

## 《バラし錠す仕様》

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 機種   | バラし錠す                                           |
| 型番   | HT-4001                                         |
| 対応範囲 | 錠剤・カプセル共用                                       |
| 本体   | W214×D132×H137 (mm)                             |
| 受皿   | W120×D165×H27 (mm)                              |
| 重量   | 1.6kg                                           |
| 材質   | ステンレス<br>アルミ<br>スチール<br>ナイロン<br>ポリアセタール<br>アクリル |
| 機能方式 | 手動式                                             |

## 《注意事項》

- 1、バラし錠すを使用する際には、左手でPTPシートを落し穴調整板に押さえつけ右手でレバーを持ちPTPシート上を押し滑らせる。
- 2、PTPシートは、本説明書の使用方法のとおり保持して下さい。除包ローラに気を付けてPTPシートを保持して下さい。ケガや錠剤がでない原因となります。
- 3、錠剤・カプセルの種類によっては、上手く取り出せない場合や破損する場合がございます。本製品はすべての錠剤・カプセルに対応できる訳ではございませんのでご了承ください。
- 4、違う種類の薬剤を除包する際は、必ず受皿を取り出して前回の残りがいないかをご確認下さい。また、PTPシートのアルミ箔がはがれ、薬剤に混入する場合がございますので、除包された薬剤は必ず確認し、アルミ箔が混入した場合は取り除いてください。